

Los mismos conceptos de limpieza y mantenimiento que se utilizan para los audifonos retroauriculares aplican para los audifonos intraauriculares. Limpie su audífono intraauricular a diario y asegúrese de que no se filtre ningún líquido por los orificios de la unidad. Tenga a bien no introducir objetos en los orificios o hendiduras.

Límpieme su Audifonos intraauricular como sigue:



Tome una toallita de limpieza HADEO húmeda y úsela para limpiar su audífono intraauricular. Esto eliminará el cerumen fácilmente y su unidad quedará limpia de forma higiénica.

Para evitar que su audífono se dañe con la humedad, séquelo regularmente en la DRYBOX o junto con una pastilla secante en la bolsa secadora HADEO o el envase de secado HADEO. Este proceso de secado se describe más detalladamente en las páginas 14 a 17.

» A fin de asegurar que usted siga disfrutando de una audición mejorada el mayor tiempo posible, es importante saber cómo limpiar y tratar los audifonos de forma correcta. «